



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUCÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

EGG YOLK TELLURITE EMULSION 50%

REF 42111603

1 X 200 mL

Liquid supplement for the differentiation of *Staphylococcus aureus* / Suplemento liquido per la differenziazione di *Staphylococcus aureus* / Supplément liquide pour la différenciation de *Staphylococcus aureus* / Lösung zur Identifizierung von *Staphylococcus aureus* / Suplemento para la diferenciación de *Staphylococcus aureus* / Supplement i lösning för differentiering *Staphylococcus aureus* / Suplemento liquido para diferenciação de *Staphylococcus aureus* / Υγρό συμπλήρωμα για διαφοροποίηση *Staphylococcus aureus*


CONTENTS/CONTENUTO/PRESENTATION/PACKUNGSINHALT/CONTENIDO/ INNEHÅLL / CONTEÚDO/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 BOTTLE : 200 ML / 1 FLACONE : 200 ML / 1 FLACON : 200 ML / 1 RÖHRCHEN : 200 ML / 1 VIAL: 200 ML / 1 AMPULLENS, : 200 ML / 1 FRASCO : 200 ML / 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ : 200 ML

VIAL CONTENTS / CONTENUTO DEL FLACONE / COMPOSITION PAR FLACON / ZUSAMMENSETZUNG JE RÖHRCHEN / CONTENIDO POR VIAL / AMPULLENS INNEHÅLL / CONTEÚDO DO FRASCO / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

Egg yolk 100 mL, K₂TeO₃ 0.42 g, NaCl 0.9 g, distilled water 100 mL.
Emulsione di tuorlo d'uovo 100 mL, K₂TeO₃ 0.42 g, NaCl 0.9 g, acqua distillata 100 mL.
Émulsion de jaunes d'œufs 100 mL, K₂TeO₃ 0.42 g, NaCl 0.9 g, eau distillée 100 mL.
Eigelb- Emulsionen 100 mL, K₂TeO₃ 0.42 g, NaCl 0.9 g, destillierten Wasser 100 mL
Emulsión de yema de huevo 100 mL, K₂TeO₃ 0.42 g, NaCl 0.9 g, agua destilada 100 mL.
Άgg Gule Lösning 100 mL, K₂TeO₃ 0.42 g, NaCl 0.9 g, destillerat vatten 100 mL.
Emulsão de gema de ovo fresca 100 mL, K₂TeO₃ 0.42 g, NaCl 0.9 g, água destilada 100 mL.
Φρέσκος κρόκος αυγού 100 ml, K₂TeO₃ 0.42 g, NaCl 0.375 g, αποσταγμένο νερό 100 ml.

DIRECTIONS / ISTRUZIONI / PRÉPARATION / ZUBEREITUNG / INSTRUCCIONES / INSTRUKTIONER / INSTRUCÕES / ΟΔΗΓΙΕΣ.

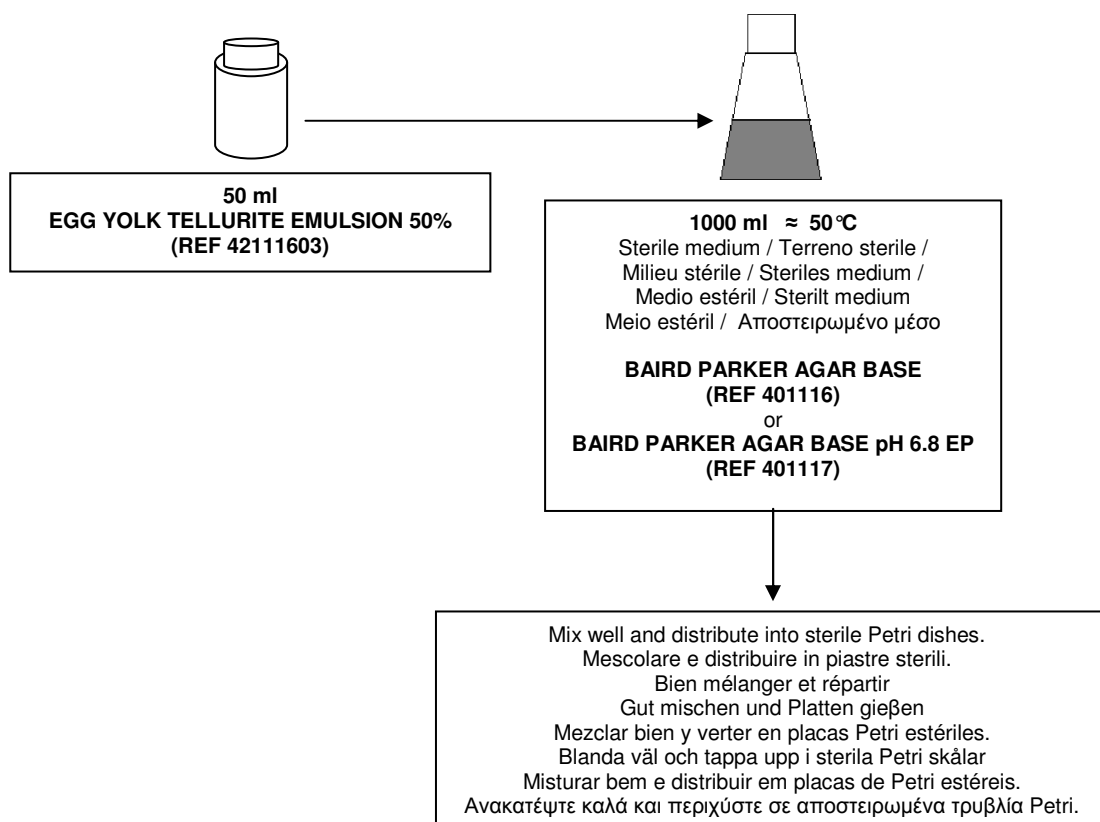



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUÇÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

STORAGE / CONSERVAZIONE / CONSERVATION / LAGERUNG / CONSERVACION / LAGRING / CONSERVAÇÃO / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Store at 2-8° - When stored as directed the supplement remains stable until the expiry date shown on the label. Do not use beyond stated expiry date. / Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza. / Conserver à 2-8°C, selon les conditions de conservation indiquées, le produit est stable jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'étiquette. Ne pas utiliser après la date d'expiration. / Lagerung: 2-8°C. Das Supplement ist bei vorschriftsmäßiger Lagerung bis zum aufgedruckten Verfalldatum haltbar. Verfalldatum beachten. / Conservar entre 2-8°C. Estable bajo estas condiciones, hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. No utilizar si ha caducado. / Lagras i 2-8°C. Om lagring sker korrekt håller sig supplement hela tiden fram till utgångs datumet som står antecknat på etiketten. Använd ej produkten efter utgångs datum. / Armazenar a 2-8°C. Quando armazenado nestas condições, o suplemento permanece estável até a data de expiração indicada no rótulo. Não utilizar após a data do vencimento. / Φυλάξτε στους 2-8°C. Όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες, το συμπλήρωμα παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που φαίνεται στην ετικέτα. Μην χρησιμοποιείτε πέραν της αναφερομένης ημερομηνίας λήξεως.

**PRECAUTIONS / PRECAUZIONI / PRÉCAUTIONS / VORSICHTSMABNAHMEN / PRECAUCIONES / SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
PRECAUÇÕES / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

The supplement should be used only by adequately trained personnel with knowledge of microbiological techniques in the laboratory. / Il prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base. / Ce produit ne doit être utilisé qu'en laboratoire par des personnels formés aux techniques de microbiologie. / Nur entsprechend ausgebildete Personen mit Kenntnissen in mikrobiologischen Methoden dürfen dieses Produkt nutzen. / El suplemento debería ser sólo usado por personal adecuadamente cualificado con conocimientos de las técnicas microbiológicas en laboratorios. / Supplementet skall endast hanteras av behörig personal med kunskap om mikrobiologiska laboratortekniker. O suplemento deve ser utilizado somente no laboratório por pessoas adequadamente treinadas e com conhecimento em técnicas microbiológicas. / Το συμπλήρωμα πρέπει να χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των μικροβιολογικών τεχνικών στο εργαστήριο.

WARNING / ATTENZIONE / ATTENTION / ACHTUNG / ATENCION / VARNING / ATENÇÃO / ΠΡΟΣΟΧΗ

Separation may occur on storage. This occurrence is a normal one and doesn't affect the quality of the product. Mix well before the use. / Durante la conservazione del prodotto si può osservare una separazione delle fasi. Questo fenomeno è da considerarsi normale e non pregiudica la qualità del prodotto. Mescolare prima dell'uso. / L'émulsion de jaunes d'oeufs peut ne pas rester homogène pendant le stockage. Ceci n'affecte pas la qualité du produit. / Bei Lagerung von Eigelb - Emulsionen kann Trennung auftreten. Dies ist normal und beeinträchtigt die Qualität des Produktes in keiner Weise. / Durante el almacenamiento puede separarse la emulsión de yema de huevo. Esta situación es normal y no afecta la calidad del producto en modo alguno. / Durante a conservação do produto poder-se-á observar que a emulsão de gema de ovo não permaneça homogênea. Este fenômeno é considerado normal e não prejudica a qualidade do produto. Misturar antes de usar. / Separation av produkt kan förekomma under lagring, vilket är normalt och påverkar inte kvaliteten på produkten. Skaka produkten väl före användning. / Μπορεί να εμφανισθεί διαχωρισμός κατά την αποθήκευση. Το γεγονός αυτό είναι φυσιολογικό και δεν έχει επίδραση στην ποιότητα του προϊόντος. Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση.