

BIOVITEX RESTORING FLUID

IMPIEGO PREVISTO

Supplemento di crescita per terreni di coltura per l'isolamenti di *Neisseria*, *Haemophilus* ed altri microrganismi esigenti.

CONTENUTO DELLE FIALE DI BIOVITEX

		Fiala per 500 ml di terreno REF 4240009	Fiala per 5 L di terreno REF 42185011	Concentrazione equivalente per litro di terreno
Vitamina B12	mg	0,05	0,5	0,1
L-glutamina	mg	50	500	100
Adenina	mg	5	50	10
Guanina	mg	0,15	1,5	0,3
Acido p-aminobenzoico	mg	0,065	0,65	0,13
L-cistina	mg	5,5	55	11
NAD (Coenzima 1)	mg	1,25	12,5	2,5
Cocarbossilasi	mg	0,5	5	1
Nitrato ferrico	mg	0,1	1	0,2
Tiamina	mg	0,015	0,15	0,03
Cisteina HCl	mg	129,5	1295	259

CONTENUTO DELLE FIALE DI RESTORING FLUID

		Fiala per 500 ml di terreno REF 4240009	Fiala per 5 L di terreno REF 42185011	Concentrazione equivalente per litro di terreno
Glucosio	g	0,5	5	1
Acqua purificata	ml	5	50	10

PREPARAZIONE**Biovitex Codice 4240009**

Sciogliere il prodotto liofilizzato con il contenuto di una fiala di Restoring Fluid, usando le precauzioni dell'asepsi. Aggiungere a 500 ml di GC Medium Base, autoclavato e raffreddato a 50°C o ad altro terreno di base desiderato.

Biovitex Codice 42185011

Sciogliere il prodotto liofilizzato con il contenuto di una fiala di Restoring Fluid, usando le precauzioni dell'asepsi. Aggiungere a 5000 ml di di GC Medium Base, autoclavato e raffreddato a 50°C o ad altro terreno di base desiderato.

Mescolare e aggiungere eventuali altri arricchimenti e supplementi selettivi (Emoglobina, sangue cotto, VCN, VCNT ecc.); trasferire in piastre Petri sterili.

DESCRIZIONE

Biovitex è una miscela liofila e sterile di fattori di crescita da utilizzare come supplemento per la coltivazione di microrganismi con peculiari esigenze nutrizionali (*Neisseria*, *Haemophilus*). Biovitex può essere impiegato per la preparazione dell'agar cioccolato arricchito, del terreno di Thayer Martin, del terreno selettivo per *Haemophilus*, del terreno per l'isolamento di *Gardnerella vaginalis*. Per una completa descrizione dell'argomento si rimanda alla scheda tecnica di GC Medium Base .

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 2-8°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento.

Validità dalla data di produzione: 18 mesi.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il prodotto qui descritto è un diagnostico *in vitro* per uso professionale e deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'impiego. Sterilizzare i materiali inoculati dopo il loro uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONI**4240009****Biovitex/Restoring Fluid,****5+5 fiale, ciascuna per 500 ml di terreno.****42185011****Biovitex/Restoring Fluid,****1+1 fiala, per 5 litri di terreno.**