

## YERSINIA SELECTIVE SUPPLEMENT

**IMPIEGO PREVISTO**

Supplemento selettivo liofilo per l'isolamento di *Yersinia enterocolitica*.

**CONTENUTO DELLE FIALE**

Cefsulodina .....7,50 mg  
Novobiocina.....1,25 mg

**PREPARAZIONE**

Ricostituire il contenuto di una fiala con 5 ml di acqua distillata sterile usando le precauzioni dell'asepsi. Aggiungere a 500 ml di CIN Agar Base (401302) raffreddato a 45-50°C. Mescolare e distribuire in piastre sterili.

**METODO D'IMPIEGO**

Aggiunto al CIN Agar Base il supplemento descritto è impiegato per l'isolamento selettivo di *Yersinia enterocolitica* da campioni di origine clinica o da altro materiale. Per una completa descrizione del metodo d'impiego del terreno completo si rimanda alla scheda tecnica di CIN Agar Base.

**CONSERVAZIONE E VALIDITA'**

Conservare a 2-8°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento. Validità dalla data di produzione: 24 mesi.

**PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI**

Il preparato contiene novobiocina ed è classificato come Xn (nocivo) ai sensi della legislazione vigente; consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Il prodotto qui descritto è un diagnostico *in vitro* per uso professionale e deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo il loro uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

**CONFEZIONI**

**4240011**                    **Yersinia Selective Supplement,**

**10 fiale liofile, ciascuna per 500 ml di terreno**

CODICE CND W0104010104

